




hämorrPEN.®

Hämorrhoiden behandeln, aber natürlich.

Medizinprodukt zur Behandlung
von Hämorrhoiden
ohne chemische Zusätze

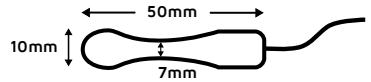

Nur für eine
Person bestimmt

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,

danke, dass Sie sich für das Medizinprodukt hämorrPEN[®] entschieden haben. hämorrPEN[®] ist ein ideales Produkt für eine akute und dauerhafte Behandlung von Hämorrhoiden. Die besondere Formgebung und das nicht an Gewebe und Wunden haftende Material bewirken, dass sich der Schließmuskel auf eine besonders schonende und schmerzfreie Weise entspannen und so zur natürlichen Rückbildung von Hämorrhoiden beitragen kann. Weiterhin wird durch hämorrPEN[®] eine Kompression vorhandener Wunden erreicht, wodurch etwaige kapillare Blutungen gestillt werden können.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen zur Anwendung dieses Medizinprodukts. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, Apotheker oder direkt an uns.


Wir wünschen Ihnen alles Gute.

Wozu wird hämorrPEN[®] angewendet?

Durch wiederholtes und gleichzeitig dauerhaftes (<60 Min. pro Anwendung) Einführen von hämorrPEN[®] in den After wird eine Entspannung der verkrampften Schließmuskulatur erreicht, welche zu einer Verbesserung der Elastizität des Analkanals und mithin zu einer beschleunigten Heilung der Hämorrhoiden führen kann. Zugleich bewirkt der durch hämorrPEN[®] auf die Hämorrhoiden ausgeübte Druck eine Kompression einer Wunde, wodurch etwaige Blutungen erfolgreich gestillt werden können.

Wie wird hämorrPEN[®] angewendet?

hämorrPEN[®] sollte durch den Schließmuskel so weit in den Analkanal eingeführt werden, bis die dünnste Stelle (ca. 7mm) des Stiftes vom Schließmuskel umschlossen ist, siehe Abb. 1. hämorrPEN[®] darf nicht tiefer in den Analkanal eingeführt werden als in der Anleitung beschrieben ist, da sonst die Gefahr besteht, dass er in den Darm rutscht. Für die Dauer der Anwendung empfiehlt sich eine entspannte Körperhaltung, vorzugsweise seitlich liegend oder sitzend, um den Halt zu unterstützen, siehe Abb. 1. Der Vorgang kann mehrmals täglich wiederholt werden.

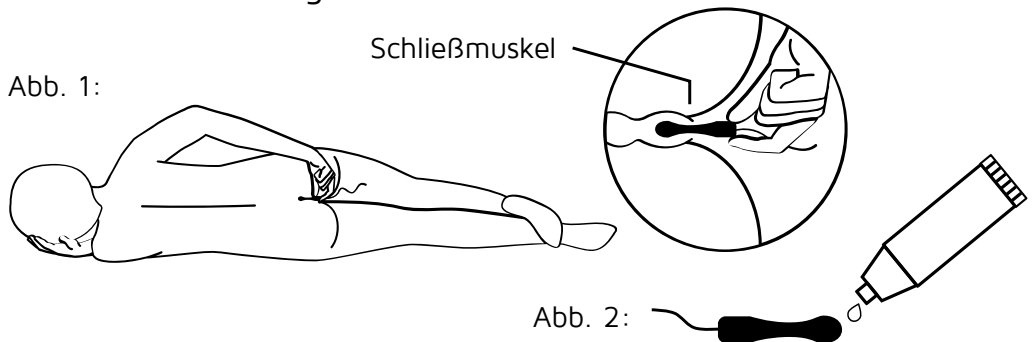

Ist die Anwendung trotz der nicht anhaftenden Form von hämorrPEN[®] unangenehm, kann auf die Spitze des Stiftes weniger als eine erbsengroße Portion einer geeigneten Salbe oder eines Gleitgels aufgetragen werden. Verwenden Sie nicht mehr Gleitmittel als nötig, um ein Herausrutschen zu verhindern, siehe Abb. 2.

Der Erfolg der Behandlung hängt im Wesentlichen von der Regelmäßigkeit der Anwendung ab. In der Regel sind die Hämorrhoiden innerhalb weniger Tage bis Wochen abgeheilt. Bei schwerwiegenderen Symptomen empfiehlt es sich, hämorrPEN® mehrere Wochen regelmäßig anzuwenden, um die Wirkungsweise zu erhöhen und das nachhaltige Abklingen der Symptome zu fördern. Empfehlenswert ist außerdem, nach Einführen von hämorrPEN® die Schließmuskulatur gegen den Widerstand des Stiftes mehrmals anzuspannen und wieder zu entspannen. Diese Maßnahme kann den Schließmuskel wieder kräftigen. Nach der Anwendung wird hämorrPEN® an seinem Rückholband herausgezogen. Bei erneut auftretenden Beschwerden kann hämorrPEN® wieder angewendet werden.

Anwendungshinweise

Eine Mehrfachverwendung von hämorrPEN® bei dem gleichen Anwender ist möglich. Vor jeder Anwendung ist hämorrPEN® auf Unversehrtheit und Sauberkeit der Oberfläche zu prüfen. Bei Veränderungen der Oberfläche ist hämorrPEN® durch einen neuen zu ersetzen. Nach Anwendung von hämorrPEN® sollte dieser mit lauwarmem Wasser und vorzugsweise einer Seifenlösung oder milden Waschlotion gereinigt werden. Nicht mit chemischen Mitteln reinigen und auch keine Haushaltsreiniger oder Spülmittel verwenden. Anschließend mit klarem Wasser reinspülen und trocknen lassen. Eine Desinfektion oder ein Auskochen ist nicht notwendig.

Besondere Hinweise

Suchen Sie bei Schmerzen, Juckreiz und Blutungen unbedingt Ihren Arzt auf. Gehen Sie jährlich zur Vorsorgeuntersuchung, denn die rechtzeitige Erkennung von Enddärmerkrankungen erhöht die Heilungschance.

Selten auftretende Nebenwirkungen

Die Verwendung von hämorrPEN® kann in seltenen Fällen ein Brennen im Analbereich verursachen. Weitere Nebenwirkungen sind nicht bekannt.



Aufbewahrungshinweise:

Medizinprodukt sorgfältig aufbewahren.
Vor Kindern sichern.

Inhalt:

1 hämorrPEN[®] (wie abgebildet) mit Rückholband und
Gebrauchsanweisung.

hämorrPEN.[®]

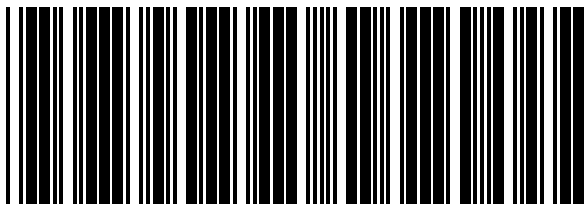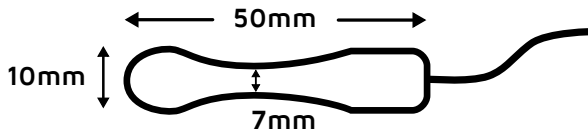

PZN -14130752

Vertrieb:

nexsana GmbH
Windheckenweg 79
53902 Bad Münstereifel

Telefon: +49 2253 93 999 41

Fax: +49 2253 93 999 93

E-Mail: service@nexsana.de



Hersteller:

Tordynex Medical AG
Windheckenweg 79
53902 Bad Münstereifel



Nur für eine
Person bestimmt

REF FST-50/10

